

## Lignes directrices pour la collecte et l'envoi du sérum



### Étape de collecte du sérum

- 1** Recueillir le sang dans un tube de sérum.
- 2** Laisser le sang coaguler en le laissant intact à température ambiante pendant environ 30 minutes.
- 3** Centrifuger le sérum pendant 10 minutes, à 1 000 – 2 000 x g.
- 4** Transférer le sérum dans les tubes fournis (ou n'importe quel autre tube propre) en utilisant une pipette Pasteur ou une seringue.



#### Quantité de sérum requise

Chiens\* 1,5 ml

Chats\* 1,5 ml

Chevaux 3 ml

En moyenne, nous nous attendons à un rendement sérique de 50% du volume sanguin entier.

\*Pour les petits animaux, prélever autant que cela est approprié en fonction de la taille de l'animal.



Si vous avez des questions ou souhaitez commander des enveloppes d'expédition gratuite contenant le sac Sécuritérigide®, le tube de sérum et le formulaire de demande, s'il vous plaît contactez-nous par téléphone (+33) 170 61 48 38 ou par e-mail [info.fr@nextmune.com](mailto:info.fr@nextmune.com) / [info.be@nextmune.com](mailto:info.be@nextmune.com).

## Lignes directrices pour la collecte et l'envoi du sérum



### Questions fréquemment posées

#### **Les médicaments symptomatiques peuvent-ils influencer sur le résultat?**

Les corticostéroïdes peuvent affecter les résultats des tests sériques s'ils sont administrés depuis plus de 2 à 3 mois (médicament oral). Interrompre le médicament pendant au moins 2 semaines avant de prélever du sang.

#### **L'échantillon de sérum lipémique ou hémolysé affecte-t-il les résultats des tests?**

Le sérum fortement hémolysé pourrait affecter le résultat, s'il vous plaît tirez du sang neuf. Le sérum lipémique n'est pas un problème.

#### **Le sérum doit-il être expédié dans un paquet froid?**

Non, il n'est pas nécessaire de le transporter dans un paquet froid.

#### **Puis-je envoyer du sérum tous les jours de la semaine?**

Oui, il n'importe quel jour.

#### **Puis-je envoyer du sang total?**

Le sérum est préféré.

#### **Puis-je ranger le sérum dans le réfrigérateur ou le congélateur?**

Oui, le sérum dans le réfrigérateur se conservera des mois et dans le congélateur pendant des années.

#### **Combien de temps faut-il avant que je reçoive les résultats?**

Une fois que le sérum est arrivé au laboratoire, il faut 2 jours.