

## Richtlijnen voor bloedafname en opsturen van serum



### Bloedafname

#### Stap

- 1** Neem bloed af in een serumbuis. Elk type serumbuis kan worden gebruikt.
- 2** Laat de serumbuis ongeveer 30 minuten op kamertemperatuur komen zodat het bloed kan stollen.
- 3** Centrifugeer gedurende 10 minuten (1.000 - 2.000 x g.)
- 4** Pippetteer het serum voorzichtig af en stuur het serum op in de meegeleverde buis (of een andere schone buis).



#### Benodigde hoeveelheid serum

Honden\* 1,5 ml  
Katten\* 1,5 ml  
Paarden 3 ml  
Gemiddeld kan 50% serum worden verwacht uit het bloedvolume.

\*In geval van kleine huisdieren, neem zoveel bloed af als geschikt is voor de grootte van het dier

### Opsturen van serum

Stuur het serum samen met het ingevulde aanvraagformulier per post naar ons op. Het adres staat al op de meegeleverde envelop. Mocht u een andere envelop gebruiken, dan kunt u ons adres op het aanvraagformulier terugvinden.

Pak de serumbuis alstublieft goed in om schade en lekken te voorkomen.



Als u vragen heeft of gratis inzendingenveloppen met een RigidSafetyBag®, serumbuis en aanvraagformulier wilt bestellen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 320 783 100 of per e-mail [info.nl@nextmune.com](mailto:info.nl@nextmune.com) / [info.be@nextmune.com](mailto:info.be@nextmune.com)

## Richtlijnen voor bloedafname en opsturen van serum



### Veelgestelde vragen

#### **Kan symptomatische medicatie de uitslag beïnvloeden?**

Corticosteroïden kunnen de uitslag beïnvloeden als ze langer dan 2-3 maanden toegediend zijn (orale medicatie). In deze gevallen kan het beste bloed worden afgenomen 2 weken na het stoppen met deze medicatie.

#### **Kan lipemisch of hemolytisch serum de uitslag beïnvloeden?**

Zwaar gehemolyseerd serum kan de uitslag beïnvloeden. Neem in dat geval nieuw bloed af. Lipemisch serum is geen probleem.

#### **Moet het serum gekoeld worden verstuurd?**

Nee, het is niet nodig om het serum gekoeld te versturen.

#### **Kan ik serum elke dag van de week opsturen?**

Ja, het maakt niet uit welke dag.

#### **Kan ik ook volbloed opsturen?**

Serum heeft de voorkeur.

#### **Kan ik het serum in de koelkast of vriezer bewaren?**

Ja, serum blijft maandenlang goed in de koelkast en jaren in de vriezer.

#### **Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag ontvang?**

Zodra het serum in het laboratorium is aangekomen duurt het 2 dagen (m.u.v. zon- en feestdagen).

#### **Heeft u assistentie nodig?**

Als u vragen hebt of als u ondersteuning nodig hebt bij de diagnose of behandeling van een patiënt, neem dan contact op met onze medische afdeling via telefoon +31 320 783 100 of per e-mail [info.nl@nextmune.com](mailto:info.nl@nextmune.com) / [info.be@nextmune.com](mailto:info.be@nextmune.com)