

Richtlinien für Blutentnahme und Einreichen von Serum



Blutentnahme

Schritt

- 1** Nehmen Sie Blut in ein Serumröhrchen. Es kann jede Art von Serumröhrchen verwendet werden.
- 2** Lassen Sie das Serumröhrchen ca. 30 Minuten auf Raumtemperatur kommen, damit das Blut gerinnen kann.
- 3** 10 Minuten zentrifugieren (1.000 - 2.000 x g)
- 4** Pipettieren Sie das Serum vorsichtig ab und geben Sie es in das mitgelieferte Röhrchen (oder ein anderes sauberes Röhrchen).



Erforderliche Serummenge

Hunde*	1,5 ml
Katzen*	1,5 ml
Pferde	3 ml

Aus dem Blutvolumen sind durchschnittlich 50% Serum zu erwarten.

*Bei kleinen Haustieren so viel Blut entnehmen, wie für die Größe des Tieres angemessen ist

Einreichen von Serum

Senden Sie uns das Serum zusammen mit dem ausgefüllten Antragsformular per Post zu. Die Adresse befindet sich bereits auf dem mitgelieferten Umschlag. Wenn Sie einen anderen Umschlag verwenden, können Sie die Adresse auf dem Antragsformular verwenden.

Bitte verpacken Sie das Serumröhrchen gut, um Beschädigungen und Lecks zu vermeiden.



Wenn Sie Fragen haben oder Umschläge mit RigidSafetyBag®, Serumröhrchen und Antragsformular kostenlos bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer +49(0)4554 716 1237 oder per E-Mail an info.de@nextmune.com.

Richtlinien für Blutentnahme und Einreichen von Serum



Häufig gestellte Fragen

Kann symptomatische Medikation das Ergebnis beeinflussen?

Kortikosteroide können das Ergebnis beeinflussen, wenn sie länger als 2-3 Monate angewendet wurden (orale Medikation). In diesen Fällen kann das beste Blut 2 Wochen nach Absetzen dieses Medikaments gesammelt werden.

Kann lipämisches oder hämolytisches Serum das Ergebnis beeinflussen?

Stark hämolytiertes Serum kann das Ergebnis beeinflussen. Nehmen Sie in diesem Fall neues Blut. Lipämisches Serum ist kein Problem.

Muss das Serum gekühlt versendet werden?

Nein, es ist nicht erforderlich, das Serum gekühlt zu versenden.

Kann ich jeden Tag der Woche Serum verschicken?

Ja, es ist egal an welchem Tag.

Kann ich auch Vollblut senden?

Serum ist bevorzugt.

Kann ich das Serum im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahren?

Ja, Serum bleibt über monatelang im Kühlschrank und Jahre im Gefrierschrank.

Wie lange dauert es, bis ich das Ergebnis erhalte?

Sobald das Serum im Labor eingetroffen ist dauert es 2 Tage (außer an Sonn- und Feiertagen).